

AIRPOP[®]


Light SE Mask

GEBRUIKS AANWIJZING

Zorg ervoor dat u uw handen minstens 20 seconden lang met water en zeep wast of gebruik een handontsmetter die minimaal 70% alcohol bevat, voor en nadat u uw AirPop-gezichtsmasker afdoet.




1. Pak het masker uit en lees de instructiefolder & voorwaarden voor gebruik.

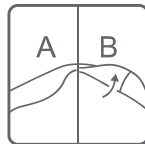

2. Om het masker af te stellen, kunnen de zachte siliconen neusbruggen (A) en (B) worden verlengd voor langere gezichten



3. Stel het masker af en zorg ervoor dat het de neus- en mondzones bedekt zoals hierboven aangegeven.

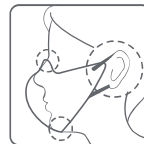

4. Verstel de positie van het masker rond de neus, kin en wangen. Stel de oorbandjes af om ervoor te zorgen dat ze goed passen

WAARSCHUWING

Om het masker correct te kunnen gebruiken is het belangrijk dat u deze voorschriften opvolgt.

Als u ziek bent, is dit masker ongeschikt. Raadpleeg een arts.

- Dit masker is geen medisch hulpmiddel in de zin van Richtlijn 93/42/EEG of Verordening EU/2017/745 (chirurgische maskers) en ook geen persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Verordening EU/2016/425 (ademhalingsbeschermingsmiddelen EN149:2001 FFP2).

- Controleer altijd of het masker goed past en de neus, mond en kin bedekt zijn. Er wordt geadviseerd dit masker direct op de huid te dragen; baarden kunnen de filtratie-effectiviteit verminderen

- Dit masker is geen vervanging van beschermende maatregelen (regelmatig handen wassen of sociale afstand houden, minder contact met andere mensen). Het minimaliseert het vrijkomen van uitgeademde druppels in de omgeving en biedt de drager een effectieve barrière tegen druppels van anderen.



WAARSCHUWING

- Vermijd aanraken van uw gezicht of het afstellen van het masker tijdens gebruik.
- Het AirPop-masker werd onderworpen aan een hygiënische beoordelingstest voordat het de productiefaciliteit verliet en het hoeft voor het eerste gebruik niet gereinigd te worden.
- Alle externe oppervlakken van het AirPop-masker zijn ondoordringbaar voor vloeistoffen, zodat uw masker kan worden afgewist met ongeparfumeerde doekjes met minimaal 70% alcohol of een schone papieren handdoek en gedurende minstens 20 seconden met een zeep-/wateroplossing.
- Laat voor gebruik de masker op een natuurlijke wijze drogen, in een schone en goed geventileerde ruimte.
- Draag uw AirPop-masker niet als het nat is of vies ruikt.
- Het wordt aanbevolen een voorraad van 3 tot 5 gezichtsmaskers /-bedekkingen te hebben zodat het ene kan worden gedragen terwijl de andere gedurende minimaal 72 uur kunnen ontsmetten.

FAQ

V: Hoe weet ik of ik mijn AirPop-masker correct draag?

A: Volg de gebruiksaanwijzing en controleer het volgende: Zit het masker nog precies in het midden? Zijn de oorbandjes niet te strak? Zijn neus, kin en wangen volledig bedekt? Bij correct dragen moet de gebruiker bij het inademen een licht zuigeffect voelen.

V: Wanneer moet ik het masker vervangen?

A: Bij een correcte verzorging en onderhoud heeft dit AirPop Light SE-masker een bewezen filtratie-effectiviteit gedurende minimaal 40 uur cumulatief gebruik. Stop met het gebruik van dit product bij de eerste tekenen van schade/gebruikssporen, of als u moeilijkheden bij het ademen ondervindt.

V: Hoe moet ik het masker bewaren?

A: Het AirPop Light-masker moet in een schone papieren of hygiënische plastic houder met goede ventilatie worden bewaard.

V: Hoe kan het masker worden weggegooid?

A: Als een masker beschadigd is of het eind van aanbevolen gebruiksduur heeft bereikt, kan het bij het normale afval worden weggegooid, nadat het gereinigd is volgens bovenstaande instructies. Het moet worden weggegooid in een afvalbak met een plastic binnenzak (bij voorkeur met een deksel en contactloze bediening). Er wordt aanbevolen een dubbele zak te gebruiken om de inhoud van de eerste zak te beschermen wanneer de buitenste zak bij het ophalen beschadigd raakt.

